

All Stone Neo Partiel Artikulator

4 lette trin til fremstilling af model og indstøbning ved brug af All Stone Neo Partiel Artikulator og triple tray aftryk

Trin 1

Først fjernes overskydende aftryksmateriale fra skeen.

Fyld tilstrækkelig med gips ind i **Master** siden på aftrykket og håndvibrer tilstrækkeligt gips ned i artikulatoråbningen.

Forsigtigt vendes aftrykket ned på artikulatoren. Der rengøres rundt langs kanten, mens gipsen stadig er blød.



Trin 2

Når gipsen er afbundet fyldes tilstrækkeligt gips ned i den **Modsatte** side af aftrykket og håndvibrer tilstrækkeligt gips ned i artikulatoråbningen.

Luk artikulatoren sammen med den bløde gips til stoparmen **næsten** rammer den modsatte side. **VIGTIGT!!** Tryk ikke længere ned.

Der rengøres rundt langs kanten, mens gipsen stadig er blød.



Trin 3

Når gipsen er afbundet, fjernes aftryksskeer og modellerne trimmes ved brug af håndstykke.

SE VIDEOINSTRUKTION

EJECTION METHOD 1 & 2 PÅ : <http://youtu.be/h46YoThtEu4>



Trin 4

Gipsmodellen fjernes fra basen.

Derefter saves modellen i sektioner som vanligt. Plastiktoppen skulle være faldet af artikulatoren, hvis den ikke er det, fjernes den fra basesiden med en pincet.

Når modellen er savet i sektioner, damprenses. Du er nu færdig med dit grundlæggende modelarbejde.

For at fjerne stamperne: træk fra toppen eller tryk fra bunden.

