

# artPrime Plus metalprimer

## Brugsvejledning



### Overfladebehandling til bonding:

Sandblæs metallimoverfladen med 50 -100 µm aluminiumoxid.  
Skyl med vand og tør.

### Påføring:

Anbring en tilstrækkelig mængde artPrime PLUS i en røreskål;  
påfør et lag på hele den overflade, der skal bondes, med en  
engangsborste og lad det virke i 10 sekunder.

Udfør bonding eller build-up procedurer  
ved hjælp af plast/resin materiale i henhold til materialets  
instruktion.

copyright © Merz Dental

# artPrime Plus metalprimer

## Brugsvejledning



### Overfladebehandling til bonding:

Sandblæs metallimoverfladen med 50 -100 µm aluminiumoxid.  
Skyl med vand og tør.

### Påføring:

Anbring en tilstrækkelig mængde artPrime PLUS i en røreskål;  
påfør et lag på hele den overflade, der skal bondes, med en  
engangsborste og lad det virke i 10 sekunder.

Udfør bonding eller build-up procedurer  
ved hjælp af plast/resin materiale i henhold til materialets  
instruktion.

copyright © Merz Dental