

## Fastmontering af Dalbo matrice i protese

Montering med lyspolymeriserende plast VITA VM<sup>®</sup>LC



1. Matricen placeres på patricen i munden på patienten
2. Der dækkes for underskæringer under matricen evt. med lidt vaseline
3. Der slibes ud i protesen, så der er plads til matricen

Der skal anvendes VITA LC modelleringsvæske og LC lyspolymeriserende plast i gingiva farve

Proteseakrylen fugtes med LC modelleringsvæske på de områder, der skal i kontakt med det lyspolymeriserende plast



Der lyses i minimum 30 sekunder.

Derefter presses med en spatel lidt lyspolymeriserende plast ned over matricens retentionsdel. Lagtykkelse max. 2 mm.

Der lyses i minimum 30 sekunder.

Der fyldes efter med lyspolymeriserende plast og processen gentages til matricen er fastholdt.

Protesen kan nu fjernes fra underlaget. Der fyldes efter med plast fra basissiden af protesen. Der kan lukkes med koldpolymeriserende akryl over det lyspolymeriserende plast.

Protesen renoveres, pudses og poleres.

