

# BRUGSANVISNING DIALOG DIAMANTPASTA

## til keramiske overflader

Det er ofte nødvendigt i forbindelse med indprøvning af metalkeramikkroner, at justere kronens form. Det kan være længden, okklusionshøjden eller facialfladens krumning.

Efter en beslibning, hvor blankbrændingen er brudt, bør overfladen igen gøres jævn og blank. Først og fremmest fordi en ru overflade indeholder mange microspalter. De virker som kærvsnit og kan være udgangspunkt for brudlinier i porcelænet. Men også fordi en ru overflade slider betydeligt mere på antagonisten end en blank overflade.

Af kosmetisk-æstetiske grunde bør en beslebet overflade have samme glans, som resten af kronen.

Efter justering af porcelænoverfladen med diamant eller sten, har kronen sin endelige form. For at undgå, at denne form ændres ved fornyet brænding, kan overfladen pudses med gummisten / polerer

Den endelige polering til højglans kan foretages med Dialog Diamantpasta på børste og filthjul.

En mængde svarende til en halv ært vil være tilstrækkelig pr. krone.

På denne måde justeres glansen så den passer til patientens øvrige tænder. Dialog diamantpasta kan anvendes oralt.