

ERKODENT KNETON Lab 80

Knetbar silikonemasse til
kapper og lignende

Produkt beskrivelse:

Stabil første gangs aftryksmateriale (putty), god æltbar, med fremragende dimensionelle egenskaber. Præcist støbemateriale baseret på polysiloxan. God elasticitet, afpasset hårdhed (shore 80). Let og enkel at anvende.

Anvendelse:

Til første gangs aftryk (korrigerende støbeteknik), dobbelt mix teknik og bidregistrering mv.

Opbevaring:

Højere rumtemperaturer og mere hærder vil fremskynde hærningen. Opbevar KNETON på et tørt sted ved stuetemperatur. (Opbevaring ved over 25° C fører til begrænset holdbarhed).

Farve: Hvid

Blanding: Et mål masse ca. 17 g. blandes med 2 cm. hærder i 45 sek.

Hærningstid ca 3 min.

Leveres i:

1,6 Kg. Incl. 1stk. hærder

5 kg. Incl. 5 stk. hærder