

## Brugsvejledning

## SITRAN - F

**Præcisionsaftrykspasta på polysilioxane basis, kondensationshærdende type 3**

- Til dobbeltaftryk og rebaseringer, tyndtflydende
- Ingen overfladespænding, nem at udstøbe
- Optimal elasticitet og stor formbestandighed (*Tilbagespring efter deformation >98,6%*)
- Stor detaljeskarphed
- Hårdhed Shore-A ca. 36
- Blandingsforhold: 1 længde basismateriale (5cm = ca. 5,0 g) til 1/2 længde hærder (2,5 cm = ca. 0,66g)
- Blandingstid: 30 - 45 sek. Inden for 1 min. anbringes i munden, under tryk i 5 sek, derefter uden tryk i 3,5 min.
- Samlet arbejdstid: 1,5 min. (*incl. 30 - 45 sek. blandingstid*)
- Afbindingstid: 5 min. total
- Må tidligst udstøbes efter 15 min.
- Aftryk opbevares tørt ved stuetemperatur.
- Tuben opbevares tørt ved stuetemperatur, stående på skruelåget.

**Tips:** Højere temperatur og mere hærder øger afbindingshastigheden.

**Vigtigt:** Undgå at få stænk af hærder i øjnene eller på tøjet.