

Brugsvejledning

SITRAN - N

Præcisionsaftrykspasta på polysilioxane basis, kondensationshærdende type 1

- Universal anvendelse
- Normalt flydende, god viskositet
- Ingen overfladespænding, nem at udstøbe
- Optimal elasticitet og stor formbestandighed (*Tilbagespring efter deformation >99%*)
- Stor detaljeskarphed
- Hårdhed Shore-A ca. 36
- Blandingsforhold: 1 længde basismateriale (5cm = ca. 5,0 g) til 1/2 længde hærder (2,5cm = ca. 0,66g)
- Blandingstid: 60 sek. Skeen forbliver i patientens mund i 3,5 min.
- Samlet arbejdstid: 1,5 min. (*incl. 60 sek. blandingstid*)
- Afbindingstid: 5 min.
- Må tidligst udstøbes efter 15 min.
- Aftryk opbevares tørt ved stuetemperatur.
- Tuben opbevares tørt ved stuetemperatur, stående på skruelåget

Tips: Højere temperatur og mere hærder øger afbindingshastigheden.

Vigtigt: Undgå at få stænk af hærder i øjnene eller på tøjet.