

FLEXISTONE

DENTAL SILICONE ISOLERINGSMATERIALE
Kondensationshærdende, lav viskositet, hård



Fig. 1

1. Blandingsforhold og blanding

Fyld blandebeholderen med FLEXISTONE til den anden markering (ca. 12 gr.). Tilsæt 35 - 40 dråber katalysator (fig 1) og bland til en homogen masse ved hjælp af en spatel (fig 2).



Fig. 2

2. Anvendelse

Påfør FLEXISTONE i et ensartet ca. 2 mm tykt lag på akryl- eller porcelænstænderne. Begynd ved interdentalrummene. Før materialet begynder at afbinde laves underskæringer med et instrument (fig. 3) for at sikre en god binding med gipsen. Det er ikke nødvendigt at anvende retentionskrystaller.

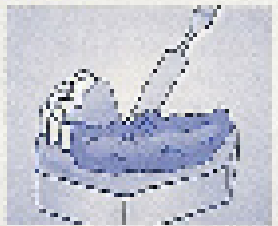


Fig. 3

3. Fjernelse

Efter polymerisering fjernes gips som sædvanligt og FLEXISTONE fjernes.

VIGTIGE ANVISNINGER

- Undgå tynde kanter - det anbefales at lave en lille skulder for at forhindre separation i kyvetten.
- Undgå at få katalysator i øjnene, kan forårsage irritation. Ved uheld skylles omgående med rindende vand i mindst 20 minutter. Kontakt derefter straks læge.

