

BRUGSVEJLEDNING

FLEXISTONE® Plus

FLEXISTONE® Plus er et A-silikone baseret præcisions-isoleringsmateriale til anvendelse i protesefremstilling. Specielt velegnet til injektionsteknikken.

Dosering og Blanding

Fyld blandeskålen med base til den første markering. Fyld derefter katalysator i til den anden markering. Udrør FLEXISTONE® Plus homogent, indtil en ensartet farve opnås.

Blandetid:..... ca. 45 sek.
Arbejdstid: ca. 3-4 min.
Afbindingstid:..... ca. 15 min.

Vær opmærksom på, at høj temperatur øger og lav temperatur forsinker afbindingshastigheden.

Isolering af protesen inden nedstøbning:

1. Bland FLEXISTONE® Plus til en homogen masse. Med en spatel pålægges et jævnt, ca. 2 mm tykt lag. Begynd med approximalrummene.

2. Inden FLEXISTONE® Plus afbinder laves underskæringer laget med en vokskniv, for at sikre en god stabil binding til gipsen efter overstøbningen.

Vigtigt

Flaskerne skal lukkes tæt umiddelbart efter brug

Advarsel

Pletter på tøjet bør undgås.

Indhold

1 flaske base 160 ml.
1 flaske katalysator 160 ml.
1 blandeskål.

Opbevaring

Ved 23°C, 50% ± 5% relativ fugtighed.

Holdbarhed

2 år fra fremstillingsdato

FLEXISTONE® Plus er CE-mærket.