

FuturaSep Plus

FuturaSep Plus er en formaldehydfri, alginat-isolering.

Anvendelses område:

FuturaSep Plus er en isoleringsvæske til gipsmodeller i protese- og kunststofteknikken.

FuturaSep Plus danner en meget tynd, glat og ensartet film, der sikrer den største nøjagtighed.

Isoleringen sikrer mod uønskede indflydninger i akrylen og resulterer i en glat overflade. Renoveringen er reduceret til et minimum.

Isoleringen påføres varm gips. To tynde lag giver det bedste resultat.

Forarbejdning:

Alt voks skal være fjernet fra modellen.

Påfør FuturaSep Plus med isoleringspensel: Første lag påføres den varme model (70°). Andet lag påføres modellen, når denne er hånd- varm (35°).

Isoleringen skal være absolut tør. Der må ikke ligge våd isolering i riller eller i små søer. Tænder og bøjler må ikke behandles med isolering.

Modellen er nu klar.

Udtørrede gipsmodeller skal gennemfugtes med vand inden isolering. Dette sikrer, at der ikke trænger luftblærer fra gipsen ind i akrylen under polymeriseringen.