

Heraeus Moldano Blå

Natur dental hårdgips klasse III til protesemodeller

Til fremstilling af antagonistmodeller, master- og arbejdsmodeller samt til kunststofprotektik.

Med Heraeus Moldano opnås :

- Stabile kantfaste modeller
- Afstemt ekspansion
- Altid ensartet kvalitet

Blandingsforhold

Moldano / vand : 100 gr / 26-28 ml.

Udrøringstid

Tilsæt **Heraeus Moldano** i den afmålte vandmængde. Udrøringen kan ske enten maskinelt i 30 sek. eller manuelt i 60 sek. ved en forarbejdningstemperatur på ca. 23° C.

Den udrørte bløde konsistens bevirker, at **Heraeus Moldano** flyder let ind i alle typer aftryk.

Tekniske data

Størkningstid:	10 min.
Overfladehårdhed tør	610 kg/cm ²
Forarbejdningstid hånd-udrørt:	6 min.
Forarbejdningstid vacuum-udrørt:	5 min.
Afbindingseksponation:	2 timer under 0,11 %.

Det anbefales at bruge vibrator under processen.

OBS! Dog aldrig længere end arbejdstiden på 6 min.

Heraeus Moldano opbevares tørt!

Leveres i følgende størrelse:

Heraeus Moldano, blå á 25 kg

