

Hotty Voksvarmer

Tekniske specifikationer

Spænding	230 V, 50Hz
Forbrug	30 W
Temperatur	95°C (± 0,5°C)
Højde	80 mm
Bredde	85 mm
Dybde	66 mm

Opstilling og ibrugtagning

Inden opstilling, skal det kontrolleres at den på apparatet opgivne spænding, stemmer overens med aktuelle netspænding. Derefter forbindes til el og tændes på hovedafbryder.

Betjening

HOTTY voksvarmer holder en konstant temperatur på 95°C (± 0,5°C). Apparatet er specielt udviklet til forarbejdning af Renfert dyppevoks. Resultatet giver vokshætter af ensartet kvalitet og styrke. Opvarmningstid ca. 7 min.

Vedligeholdelse

HOTTY kræver ingen speciel vedligeholdelse, det tilrådes dog at aftørre kabinettet for spildt voks med en tør klud eller serviet.