

Brugsvejledning


KROMOPAN® 168 hours EDS

Kromopan Alginat aftryksmateriale klasse A, karakteriseret ved stor forenlighed med gips, sikrer perfekt afbinding af gips og dermed perfekt gengivelse af alle overflade detaljer.

Arbejde ved hjælp af de kromatiske faser



VIOLET: Kromopan blandes med vand og spartles igennem, så længe materialet er **violet**.

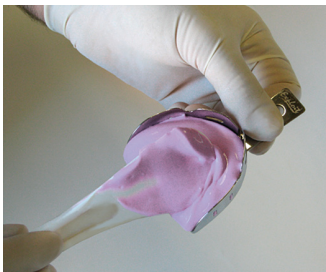

ROSA: Når materialet bliver **rosa**, kan det lægges i aftryksskeen og formes.



HVID: Når kromopan i aftryksskeen bliver **hvid**, er det tid til at tage aftryk.

Temperatur ændringer kan forårsage små variationer i blandings- og arbejdstid, hvilket automatisk indikeres ved farveforandring.

Afbindingstiden i munden er 30 sek.

Kromopans farve guide sikrer at blanding og aftrykstaging er perfekt timet. Kromopans enestående teknik eliminerer tvivlsomme aftryk og dermed kostbare omlavninger.

Vask, skyl og ryst vandet af aftrykket, som derefter kan udstøbes. Hvis det ønskes kan aftrykket opbevares i lukket plastikpose uden andet end den fugt der er på aftrykket i op til 168 timer, og stadig støbes ud med fremragende resultat.

Aftrykket må ikke efterlades i luft eller under vand.

Kromopan opbevares i lukket beholder på et køligt sted.

Små aftryk: 1 mål pulver (9 gr.)
1 mål vand (20 ml.)

Store aftryk: 2 mål pulver (18 gr.)
2 mål vand (40 ml.)

Bland vand (demineraliseret) og pulver grundigt.

Blandingstid: 45 sek. ved 23°C

Arbejdstid: 1 min og 45 sek ved 23°C
(incl. blandingsstid)

Afbindingstid: 3 min. ved 23°C
(incl. arbejdstid)

Type I: Hurtig afbinding, efter ISO 1563