

Dreve MultiSpot®


Betjeningsvejledning



Dreve MultiSpot® hånd-lyspolymeriseringslampe er specielt udviklet til hærkning og for-polymerisering af alle lyspolymeriserende materialer anvendt på dentallaboratorier. Grundet apparatets DWL system, er den handy ledningsfri lyslampe specielt anvendelig til komposit materialer, materialer til fremstilling og reparation af skinner eller orthodonti og udblokningsmaterialer. HUSK slutpolymerisering i lyspolymeriseringsapparat i minimum 10 min.

Teknisk beskrivelse

Dimension:	max. 132 x 32
Vægt:	ca. 140 gr.
Genopladelig batteri:	3.7 V/3100 mAh
Batteri oplader:	input: 100-240 V 50/60 Hz
Polymerisation:	385-390 + 465-470 nm
Tidsinterval:	20 sek.

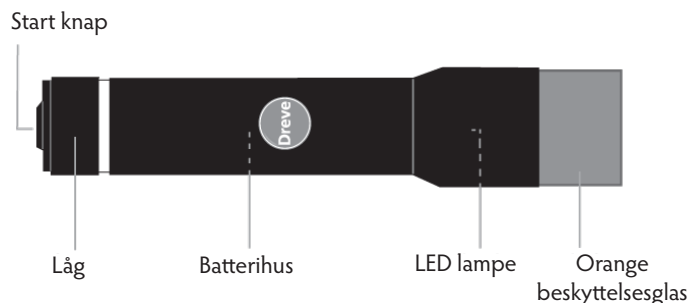

Øjenbeskyttelse

Undgå altid at se direkte ind i LED-lyset og peg aldrig på andre med lampen. Lampens intensitet og lysets bølgelængde kan forårsage skade på øjet ved gentagen direkte visuel kontakt! Der bør altid arbejdes under den orange beskyttelse. Personer, der er særligt sensitive bør anvende dertil egnede beskyttelsesbriller.

Opstart af MultiSpot® lyslampe

Det opladelige batteri skal fuldt oplades inden ibrugtagning. Låget i enden af lampen skrues af og batteriet placeres. Låget skrues fast og lampen er klar til brug. For at aktivere lampen trykkes på startknappen på endelåget. Den orange skærm skal omslutte emnet, der skal polymeriseres så meget som muligt. Tidsintervallet på lyset er 20 sekunder, derefter slukkes lyset automatisk. Tryk 2 gange på startknappen og lyset starter igen. Polymerisation kan afbrydes ved tryk på startknappen.