

BETJENINGSVEJLEDNING

MEGALIGHT ST



Tekniske Specifikationer:

Spænding:	230 V ~ 50 Hz
Sikring:	T 1,25 A
Forbrug:	35 W
Lamper:	4 Lysstofrør 9W 320nm - 450nm
Brændtid:	ca. 500 timer
Polymeriseringstid:	4 min 40 sek.

Beskrivelse:

Megalight ST er specielt designet til polymerisering af UVA-lyshærdende skematerialer, men kan også anvendes til andre lyshærdende materialer.

Lysset fra de 4 lamper sikrer en intensiv polymerisering af skemateriale i lag op til 4 mm tykkelse.

Betjening:

Megalight ST leveres uden lamperne installeret.

Inden tilslutning til lysnettet monteres disse og det kontrolleres at spænding stemmer overens, se typeskilt.

Tænd for hovedafbryderen på bagsiden af Megalight ST, netafbryderen lyser. Er dette ikke tilfældet kontrolleres sikringen.

Polymerisering:

Modellen med den færdigformede ske anbringes i skuffen på Megalight ST. Skuffen lukkes og Megalight startes ved at trykke på knappen start/stop. Lamperne lyser. Efter 4 min. 40 sek slukker lamperne og polymeriseringen er slut. Det anbefales at fjerne skeen fra modellen og polymerisere den fra bagsiden.

Megalight ST slukkes ved at slukke for hovedafbryderen på bagsiden af apparatet.

Udskiftning af lamper:

Det anbefales at udskifte lamperne 1 gang om året eller for hver 500 timer.

ADVARSEL:

Udskift kun lamper når apparatet er koldt.

Fremgangsmåde:

1. Fjern stikket fra apparatet.
2. Lamperne trækkes forsigtigt ud af fatningen ved at trække fremad
3. Udskift alle lamper med nye..

Rengøring

1. Fjern stikket fra apparatet.
2. Rengør apparatet med sprit
3. Reflektorfladerne rengøres altid grundigt for bedst mulig polymerisering.