

NOVA®

DesInfekt

Færdigblandet opløsning til desinfektion

Brugsklar opløsning (uden aldehyder og phenoler) til hurtig desinfektion og grundig rengøring af materialer som silikone, alginat, polyæter og andre materialer til brug i dentalbranchen.

Effektivt spektrum

Virker mod følgende vira og sygdomme:

Tuberkulocid, baktericid og vira som HBV-/HIV/HCV, samt influenza (VAH-metode 15 / EN14476):
Lad virke i 1 min til 15 min. i 100% væskekoncentration.

Brug biocider sikkert (korteste indvirkningstid for overflade desinfektionsmiddel i VAH listen:
5 minutter)

Bakterier	1 min.
Tb bakterier	5 min.
HBV, HCV, HIV,	1 min.
Fungicid (Candida albians)	5 min.

Læs altid etiketten og produktdatablad før brug.

Brugsvejledning

Aftrykket lægges i væsken, så det er dækket. Lad opløsningen virke i 5 min. og skyl derefter aftrykket under rindende koldt vand (alginat og hydrokolloid dyppes kort i opløsningen og lægges til tørre).

Før udstøbning skylles aftrykket med trimmervand.

Brug beskyttelseshandsker, evt. Nitrilhandsker fra DK DentalDepot.

Lægges flere aftryk efter hinanden i opløsningen mindskes effekten.

Væsken bør skiftes hver anden dag (ved normal smudighed eller hvis væsken er uklar).

Brandfarlig væske og damp.

Undgå kontakt med hud og øjne.

I tilfælde af hudkontakt skyl straks med rigeligt vand.

Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Af sikkerhedshensyn se sikkerhedsdatablad.