

NOVA arbejdsgips

Syntetisk arbejdsgips klasse II

Anvendes til indstøbning i artikulatur samt til nedstøbning og simpelt modelarbejde.



Blandingsforhold

NOVA arbejdsgips / vand: 100 gr. / 46 ml.
Vand / **NOVA arbejdsgips**: 0,46 ml./gr.

Udrøringstid

Tilsæt **NOVA arbejdsgips** i den afmålte vandmængde. Lad blandingen ligge i blød i 20 sek. Udrøringen kan ske enten maskinelt i 30 sek. eller manuelt i 60 sek. ved en forarbejdningstemperatur på ca. 23° C. Konsistensen bliver mere flydende ved udrøringen og opnår optimal viskositet ved brug af vibrator.

Tekniske data

Størkningstid: 10-12 min.
Brudstyrke: 12 N/mm²
Forarbejdningstid: 4 min.
Afbindingseksansion: under 0,30 %.

Brug vibrator under processen.

OBS! Dog aldrig længere end arbejdstiden på 4 min.

NOVA arbejdsgips opbevares tørt!

Vigtigt!

NOVA arbejdsgips er som alle andre gipsprodukter meget følsom overfor fugt og iltning. Luk derfor altid beholderen efter brug.

NOVA arbejdsgips, som har været lagret under ekstreme temperaturer, bør opbevares ved en stuetemperatur på 23° C adskillige timer før brug.

Leveres i følgende størrelse:

NOVA arbejdsgips, hvid á 18 kg