

NOVA artikulationsgips

Aftryksgips - Hurtighærdende

Til indstøbning i artikulatur, fixering af rebaseringer og bidregistrering.



Blandingsforhold

NOVA artikulationsgips / vand: 100 gr. / 30 ml.

Udrøringstid

Tilsæt **NOVA artikulationsgips** i den afmålte vandmængde. Udrøringen kan ske enten maskinelt i 30 sek. eller manuelt i 60 sek. ved en forarbejdningstemperatur på ca. 23° C.

Tekniske data

Størkningstid:	ca. 3,5 min.
Kompressionsstyrke:	min. 20 N/mm ²
Hårdhed	min. 50 N/mm ²
Afbindingsekspansion:	under 0,03 %.

Brug vibrator under processen.
OBS! Dog aldrig længere end arbejdstiden.

NOVA artikulationsgips opbevares tørt!

Vigtigt!

NOVA artikulationsgips er som alle andre gipsprodukter meget følsom overfor fugt og iltning. Luk derfor altid beholderen efter brug.

NOVA artikulationsgips, som har været lagret under ekstreme temperaturer, bør opbevares ved en stuetemperatur på 23° C adskillige timer før brug.

Leveres i følgende størrelse:

NOVA artikulationsgips, hvid á 18 kg