

# NOVA DIE STONE

Superhårdgips af særlig høj kvalitet

Stampemateriale med tiksotropisk konsistens klasse IV ( DIN EN 26 873 )

Til fremstilling af alle master- og arbejdsmodeller, der kræver særligt nøjagtige og gode mekaniske egenskaber f.eks.:

Seriemodeller til guldteknik  
Kontrolmodeller til porcelæn  
Mastermodeller til støbte stel

Med NOVA DIE STONE opnås :

- Meget glatte, hårde overflader
- Hurtig adskillelse fra aftryk
- Hårde, kant-stabile modeller
- Stor nøjagtighed
- Ridses stabil



## Blandingsforhold

NOVA DIE STONE / vand : 100 gr / 20 ml.

## Udrøringstid

Tilsæt NOVA DIE STONE i den afmålte vandmængde.

Udrøring maskinelt i 30 sek. eller manuelt i 60 sek. ved en forarbejdningstemperatur på ca. 23 ° C.

## Tekniske data

Størkningstid:	ca. 12 min.
Trykstyrke efter 1 timer:	60 N/mm <sup>2</sup>
Overfladehårdhed efter 24 timer:	min. 250 N/mm <sup>2</sup>
Forarbejdningstid:	ca 7 min.
Afbindings-ekspansion (2 timer):	mindre end 0,10 %
Farve:	gul-brun

**Det anbefales at bruge vibrator under processen.**

**OBS! Dog aldrig længere end arbejdstiden 7 min.**

NOVA DIE STONE opbevares tørt!

NOVA DIE STONE leveres i 18 og 4,5 kg. spande.