

NOVA ROCK NATUR

Dental superhårdgips klasse IV til sektionmodeller

Til fremstilling af alle master- og arbejdsmodeller, der kræver nøjagtige og gode mekaniske egenskaber f.eks.:

Seriemodeller til guldteknik
 Kontrolmodeller til porcelæn
 Mastermodeller til støbte stel



Med NOVA ROCK NATUR opnås :

- Glatte, hårde overflader
- Hårde, kant-stabile modeller
- Altid ens kvalitet
- Minimum ekspansion

Blandingsforhold

NOVA ROCK NATUR / vand : 100 gr / 23 ml.

Udrøringstid

Tilsæt NOVA ROCK NATUR i den afmålte vandmængde, lad stå i 20-25 sek. Udrøring maskinelt i 30 sek. eller manuelt i 60 sek. ved en forarbejdningstemperatur på ca. 23 ° C.
 Den udrørte silkebløde konsistens bevirker, at NOVA ROCK NATUR flyder let ind i alle typer aftryk.

Tekniske data

Størkningstid:	10 min.
Overfladehårdhed tør	90 MPa
Forarbejdningstid	3 - 6 min.
Afbindings-ekspansion:	max. 0,09 %.

Det anbefales at bruge vibrator under processen.
OBS! Dog aldrig længere end arbejdstiden 6 min.

NOVA ROCK NATUR opbevares tørt og bruges inden for 3 måneder efter anbrud!

Leveres i følgende størrelser:

- NOVA ROCK NATUR, rosa 1 Sp. á 5 kg
- NOVA ROCK NATUR, rosa 1 Sp. á 18 kg