

NOVA rock super

Syntetisk dental superhårdgips klasse IV til sektionsmodeller

Til fremstilling af alle master- og arbejdsmodeller, der kræver nøjagtige og gode mekaniske egenskaber f.eks.:

Seriemodeller til guldteknik
 Kontrolmodeller til porcelæn
 Mastermodeller til støbte stel
 Modeller til ortodonti

Med NOVA rock super opnås :

- Glatte, hårde overflader
- Hårde, kant-stabile modeller
- Altid ens kvalitet
- Minimum ekspansion



Blandingsforhold

NOVA rock super / vand : 100 gr / 23 ml.
 Til hel OK/UK anvendes: 150 gr / 36 ml.

Udrøringstid

Tilsæt NOVA rock super i den afmålte vandmængde. Udrøring maskinelt i 30 sek. eller manuelt i 60 sek. ved en forarbejdningstemperatur på ca. 23 ° C.

Den udrørte silkebløde konsistens bevirker, at NOVA rock super flyder let ind i alle typer aftryk.

Tekniske data

Størkningstid: 9 min.
 Adskilles tidligst efter: 30 min.
 Brudstyrke efter 2 timer: 50 N/mm² (7,000 psi).
 Overfladehårdhed efter 24 timer: over 150 N/mm² (21,000 psi).
 Forarbejdningstid: 5 min.
 Afbindings-ekspansion: 2 timer ca. 0,10%.

Det anbefales at bruge vibrator under processen.
OBS! Dog aldrig længere end arbejdstiden 5 min.

NOVA rock super opbevares tørt!

Leveres i følgende størrelser:

NOVA rock super, hvid á	18 kg
NOVA rock super, hvid á	5 kg
NOVA rock super, rosa á	18 kg
NOVA rock super, rosa á	5 kg