

NOVA stone fine

Syntetisk dental hårdgips klasse III til protesemodeller

Til fremstilling af antagonistmodeller, master- og arbejdsmodeller samt til kunststofprotektik.

Med NOVA stone fine opnås :

- Stabil kantfaste modeller
- Afstemt ekspansion
- Altid ens kvalitet

Blandingsforhold

NOVA stone fine / vand : 100 gr / 30 ml.
Til hel OK/UK anvendes: 150 gr / 45 ml.



Udrøringstid

Tilsæt NOVA stone fine i den afmålte vandmængde. Udrøringen kan ske enten maskinelt i 30 sek. eller manuelt i 60 sek. ved en forarbejdningstemperatur på ca. 23° C.

Den udrørte bløde konsistens bevirker, at NOVA stone fine flyder let ind i alle typer aftryk.

Tekniske data

Størkningstid: 10 min.
Brudstyrke: 24 timer over 30 N/mm²
Overfladehårdhed: 24 timer over 80 N/mm²
Forarbejdningstid: 6 min.
Afbindings-ekspansion: 2 timer under 0,20 %.

Det anbefales at bruge vibrator under processen.

OBS! Dog aldrig længere end arbejdstiden på 6 min.

NOVA stone fine opbevares tørt!

Leveres i følgende størrelser:

NOVA stone fine, hvid	á	18 kg
NOVA stone fine, hvid	á	5 kg
NOVA stone fine, gul	á	18 kg
NOVA stone fine, gul	á	5 kg