

NOVA stone NATUR

Natur dental hårdgips klasse III til protesemodeller

Til fremstilling af antagonistmodeller, master- og arbejdsmodeller samt til kunststofprotektik.

Med NOVA stone NATUR opnås :

- Stabile kantfaste modeller
- Afstemt ekspansion
- Altid ensartet kvalitet

Blandingsforhold

NOVA stone NATUR / vand : 100 gr / 26-28 ml.



Udrøringstid

Tilsæt NOVA Stone NATUR i den afmålte vandmængde. Udrøringen kan ske enten maskinelt i 30 sek. eller manuelt i 60 sek. ved en forarbejdningstemperatur på ca. 23° C.

Den udrørte bløde konsistens bevirker, at NOVA stone NATUR flyder let ind i alle typer aftryk.

Tekniske data

Størkningstid:	10 min.
Overfladehårdhed tør	610 kg/cm ²
Forarbejdningstid hånd-udrørt:	6 min.
Forarbejdningstid vacuum-udrørt:	5 min.
Afbindingsekspansion:	2 timer under 0,11 %.

Det anbefales at bruge vibrator under processen.

OBS! Dog aldrig længere end arbejdstiden på 6 min.

NOVA stone NATUR opbevares tørt!

Leveres i følgende størrelser:

NOVA stone NATUR , blå 1 Sp. á 18 kg