

# Nova Stone Natur Hvid

## Natur dental hårdgips klasse III til protesemodeller

Til fremstilling af antagonistmodeller, master- og arbejdsmodeller samt til kunststofprotektik.

### Med Nova Stone Natur opnås :

- Stabile kantfaste modeller
- Afstemt ekspansion
- Altid ensartet kvalitet

### Blandingsforhold

Nova Stone Natur / vand : 100 gr / 28 ml.

### Udrøringstid

Tilsæt **Nova Stone Natur** i den afmålte vandmængde. Udrøringen kan ske enten maskinelt i 30 sek. eller manuelt i 60 sek. ved en forarbejdningstemperatur på ca. 23° C.

### Tekniske data

Størkningstid:	13 min.
Overfladehårdhed tør	59 MPa
Forarbejdningstid:	5 - 7 min.
Afbindingseksponation:	0,12 %.

Det anbefales at bruge vibrator under processen.

**OBS!** Dog aldrig længere end arbejdstiden på 6 min.

Nova Stone Natur opbevares tørt!

Leveres i følgende størrelser:

**Nova Stone Natur**, hvid 1 Sp. á 18 kg

**Nova Stone Natur**, hvid 1 Sp. á 5 kg