

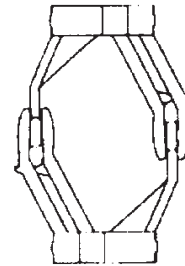


ORBIX EENGANGSARTIKULATOR / BRUGSANVISNING


Orbix eengangsartikulatorer leveres i to dele, der sættes sammen før brug.

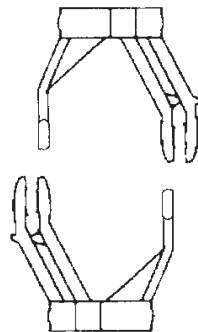


Orbix eengangsartikulator

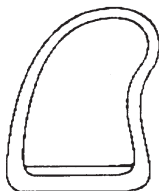




Orbix sokkelbund
partiel venstre

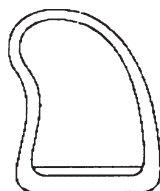

Orbix sokkelbund
partiel højre




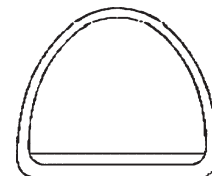


Orbix sokkelbund
fuldkæbe

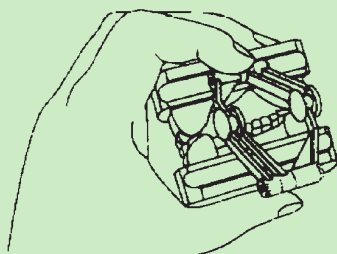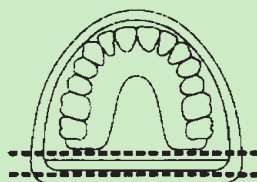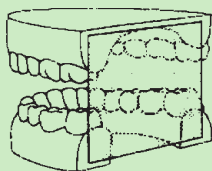

1. Ved understøbning af modellen er det vigtigt at undgå store forskelle i vinklen på lim-kanalen. Trim bagsiden af over- hhv. under-tandbue. Kontrollér, at bagsiderne er parallelle, samt parallelle med sokkelformens bagside.

2. Kontrollér at alle led på artikulatoren er i korrekt centreret position, og at låsepalen er i indgreb (se punkt 6 vedr. låsning)
Hold eller fixér modellerne i korrekt position. Placér den ene halvdel af Orbix artikulatoren i den cylindriske kanal på modellen.
Hold denne halvdel med en finger som vist, efterladende den anden halvdel fri af den anden kanal.

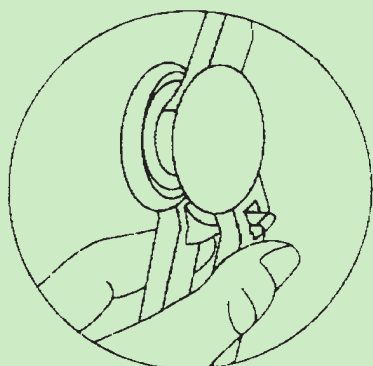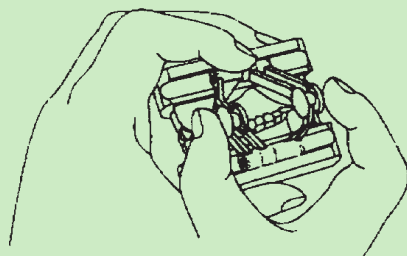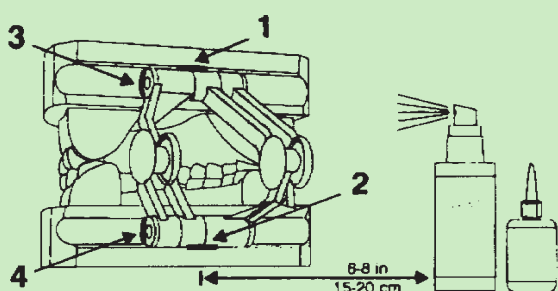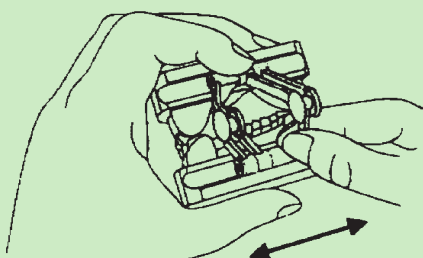

3. Med den anden hånd placeres den frie halvdel af artikulatoren i den frie kanal og bevæges fra side til side for at sikre at den er fuldt indgreb med kanalen.

Når begge halvdele er i fuldt indgreb kan man skyde artikulatoren fra side til side for at centrere denne.

Kontrolér at begge halvdele er i fuldt indgreb inden limning.

4. Modellerne skal tørre ved stuetemperatur inden limning.

Hold modellerne med bagsiden opad og påfør lim ved punkterne 1 & 2, indtil man kan se at hele leddet er fyldt ved punkterne 3 & 4. Påfør limen inden acceleratoren.

Hold accelerator flasken ca 15-20 cm fra modellerne og spray den synlige lim.

Lad tørre i 10 min.

5. Een bevægelse er alt der kræves for at frigøre låsepalerne på begge hængsler.

For at frigøre låsepalerne placeres tommelfinger på det ene hængsel og pegefinger på det andet og der klemmes til låsepalerne frigøres fra begge hængslerne med et lille klik.




Artikulatoren er nu i funktionsstilling.


6. To bevægelser er påkrævet for at låse artikulatoren.

Klem hver af dobbeltarmene lige under låsepalerne til der høres et klik.

NB.: I visse situationer kan man med fordel checke occlusionen med det ene hængsel lukket.

7. Orbix adapter anvendes på modeller med rille eller flad bagkant.
I tilfælde hvor der ikke er slidse, skæres tappen bort og Orbix adapter limes direkte på modellens bagkant.

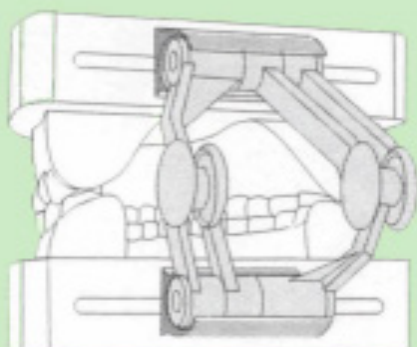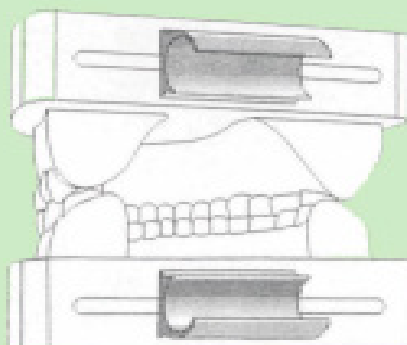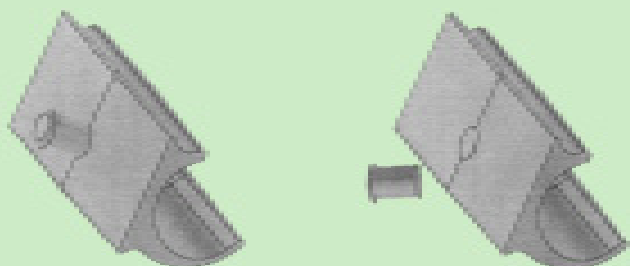

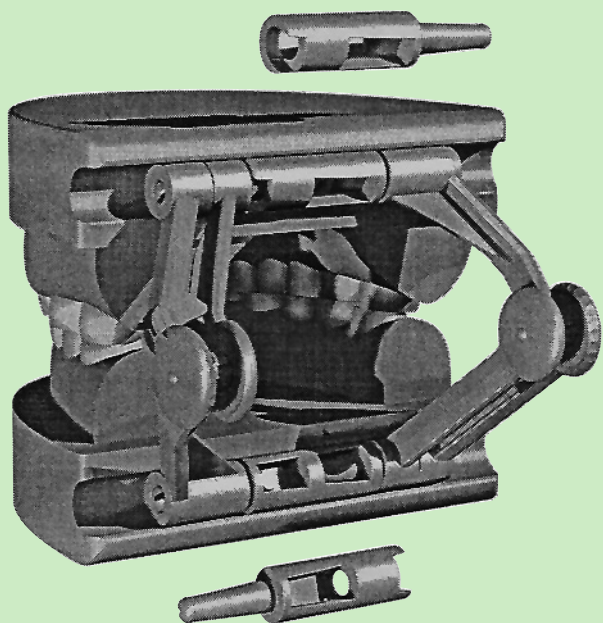


Orbix Forlænger

Hvis du har monteret en orbix artikulatør i den brede form, så kender du til den ekstra stabilitet, som det giver at afstanden mellem kondylerne er større.

Den nye orbix forlænger giver en øget stabilitet i artikulatøren uden at du skal lime de fire artikulatørdelen separat.

Der skal kun limes to gange.

Ved brug af forlængere samler du artikulatøren som sædvanligt og så trækker du artikulatøren fra hinanden i en venstre og højre halvdel. Derefter klikkes forlængerne mellem de to halvdele og der limes til modellen.

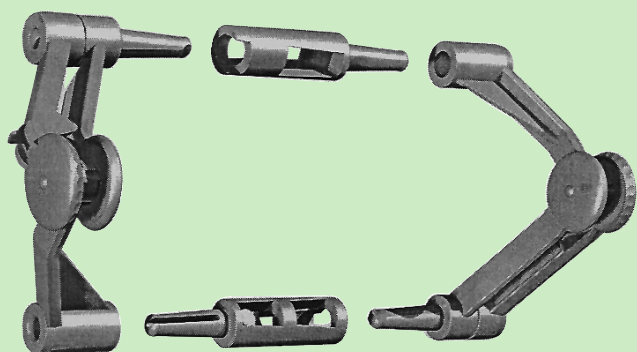

Orbix adapter letter fastgørelse af artikulatøren på modellen, uden at du har behov for at anvende sokkelbunde.