

Profi-dent Protorch brænder

Betjeningsvejledning



Påfyldning af gas

Påfyldning af gas bør ske et velventileret sted og væk fra åben ild.

Protorch brænderen påfyldes fra bunden og gasflasken holdes vertikalt. Gasdysen trykkes ind i påfyldningsventilen. Påfyld langsomt og stop påfyldning, når gassen begynder at flyde over.

Vent mindst 3 minutter før ibrugtagning for at sikre, at gassen stabiliserer sig og overskydende gas på overfladen fordamper.

Genpåfyldning af gas


Genpåfyldning bør ske på et ventileret sted, væk fra åben flamme og rygning. Sluk for brænderen og kontroller, at flammen er fuldstændig gået ud.

Vent til brænderen er helt kold før genpåfyldning, derefter påfyldes som ovenfor beskrevet.

Temperatur 1300° C

Tænding af Protorch brænder

Pres tændingsknappen ind for at tænde brænderen (1). Tænder flammen ikke, prøv igen.

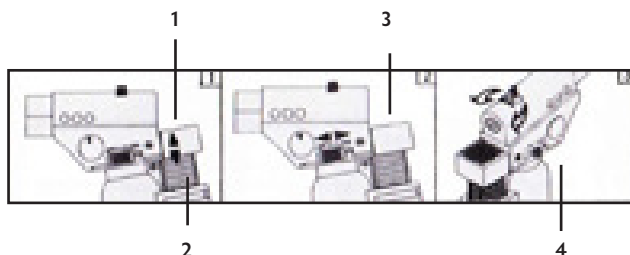

Efter tænding fastholdes flammen ved at skubbe den hvide Lock-knap (2) i pilens retning. Ved slukning skubbes Lock-knappen i modsat retning.

Flammens intensitet kontrolleres med luftjusteringsknappen (3), gasstrømmen med skydeknappen (4).

Advarsel

Brænderen holdes uden for børns rækkevidde. Anvend ikke brænderen i tilstedeværelse af børn. Ret ikke flammen mod personer eller brandbart materiale. Protorch indeholder meget brandbar gas under tryk. Opbevares under 40° C eller væk fra sollys. Ændring af brænderen er ikke tilrådeligt. Protorch brænderen må ikke afkøles i vand. Brænderen bør ikke anvendes i lukkede områder (stinkskab). Spidsen på Protorch brænderen bliver meget varm ved - og efter brug. Efter brug sikres, at flammen er helt slukket. Brænderen skal være helt afkølet før opbevaring i skuffe eller lignende.