

## BETJENINGSVEJLEDNING

# Renfert basic classic sandblæser

### Tekniske specifikationer

Højde:	250 mm
Bredde:	336 mm
Dybde:	395 mm
Spænding:	230/240 V/50 Hz
Forbrug (lampe):	11 W
Vægt (to kammer):	6,5 kg.

### Installation

1. Apparatet er klar til brug med kun to tanke. Ved brug med flere tanke, skal monteringsvejledningen for dette anvendes.
2. Tilslut fodkontakten til sandblæser og luftforsyning som vist på fig. 1 - 3.  
Vær opmærksom på at trykslangen ikke får knæk eller skarpe bøjninger.

### Kontroller at spændingsangivelserne på apparatet er korrekt og at lampemodulet er monteret ordentlig.

3. Tilslut lampen til el og tænd på kontakten ved ledningen.
4. Se fig.4. Aktivér fodkontrollen og indstil lufttrykket ved hjælp af kontrollen "A". Arbejdstrykket kan stilles mellem 1 og 6 bar.  
Ved at anvende omskifteren "B" vælges den ønskede tank. Farvemarkering på omskifteren svarer til farven på mundstykket. Kontrollér om der kommer luft fra dysen. Rengøringsdysen aktiveres ved at trykke på studsespidsen.

### Fyldning af tank

Åben tanken ved at dreje låget mod uret. Påfyld det ønskede sandblæsningsmiddel til maximum påfyldningshøjde (se markeringen på bagsiden af tanken).  
Inden lukning af tanken fjernes evt. spild fra området ved låget før dette skrues på igen.  
**TRYK IKKE PÅ FODPEDALEN UNDER FYLDNING.**

### Vedligeholdelse

Støvsug kammeret med jævne mellemrum, også under bakken, ved at fjerne denne. Vandudskilleren på trykregulatoren tømmes for vand ved at aktivere ventilen i bunden af denne.  
Udskiftning af dyser efter behov. Kontroller inden montering af dyse, at der ikke er støv eller sand i gevindet.  
Udskiftning af vindue. Phillips-skruerne på toppen løsnes, tag glasset ud.  
Indsæt det nye glas, kontrollér, at det sidder lige, spænd skruerne omhyggeligt.  
Husk at vende glasset med den coatede side nedad. Husk at fjerne beskyttelsesfilmen inden montering.

### Udsug

Basic classic er forsynet med studs på bagsiden til montering af udsug.  
Da der produceres micro-støvpartikler bør sandblæseren aldrig anvendes uden udsug.