

## Rengøring og vedligeholdelse af AmannGirrbach fræsemaskiner

### Støvsugning

Støvsug tør-fræsere hver dag – og tør af inde i vådfræsere, så der ikke ophober sig slibeslam. Lad lågen stå åben efter rengøring, så kamret kan tørre. Husk at tjekke at bor sidder korrekt bagefter. Man kan bedre komme til, hvis man i softwaren vælger "Clean working space". Bagefter køres tilbage i "Idle position", som betyder, at der nu er klar til fræs.

Støvsugerposen skal skiftes, når softwaren siger "Fully blocked". Luftgennemstrømningssensor registrerer tid til poseskift. Fold posen godt ud inden isættelsen. Det er meget vigtigt, at posen sættes godt på plads med greb hele vejen rundt. Skub den helt i bund.

### Vindue-rens

Klik på "Clean inspection window" efter hver fræsning og aftør med ren fugtug klud - gerne microfiber.

### Kølevæske på vådfræser

Ved daglig brug skiftes kølevæske på vådfræser én gang om måneden ellers hver 3. måned. Kølevæske tjekkes én gang om ugen for pH - værdi.

### Rensning og renhold af spindel

Motorspindelen skal holdes ren, så den ikke kommer til at dreje skævt på sin akse. Kør en test blank én gang hver anden måned for at tjekke, at spindelen kører nøjagtigt.

#### *Rens spindeler hver fredag som huskeregel*

Støvsug og gør rent i fræsere inden du renser spindelen.

#### **"Move to service position" for at rense spindelen:**

- Tag lille flad værktøjsæske. "spindel service kit".
- Sæt det store bor i spindelen
- Løsn spindelen med den lille nøgle imod uret.
- Damprens indmaden af spindelen = spindel chuck.
- Stik ALDRIG noget ind i spindel-hullet. Kun spindel-filtdutten skal køres rundt derinde et par gange.
- Når spindel-chucken er renses, smøres den med en meget lille klat fedt fra den lille sorte tube – kun en lille hinde på spidsen af fingeren. Den smøres kun på ydersiden – helt til kanten af hullet, men IKKE ind i hullet.
- Sæt spindel-chucken i motoren igen med fingrene.
- Drej modsat uret til du hører et klik.
- Skrues så løst ind med fingrene i retning med uret.
- Sæt det store bor i – og skru i med den lille skrue fra værktøjsæsken. Der skal ikke bruges stor styrke. Den skal bare sidde pænt fast og så have et forsigtigt ekstra lille godt "nøk" tilsidst.
- Sæt boret tilbage i den sædvanlige position.
- Tjek jævnlige gummiet omkring motorerne for huller og mørhed.

### HEPA-filtre

Det store HEPA-filter i sugemotoren skal skiftes for hver 5. poseskift. Husk at støvsuge lågen indvendigt og rundt ved gummi- kanterne, når du tjekker filtre og skifter pose.

**Luftfiltret bag på maskinen skal tjekkes dagligt før opstart af maskinen. Glasset skal være tørt og klart.**