

## Individualisering af protesetænder



## VITA VM LC Individualisering af VITA kunststoftænder




Ved anvendelse af VITA VM LC kan du hurtigt og nemt karakterisere VITA akryltænder uden ændring af grundform og overfladestruktur.

*Ved individualisering i det incisale område reduceres VITA PHYSIODENS fronttænder fra den palatinal side. På den måde bevares den labiale overfladestruktur og du sparer tid på genskabelse af overfladerelief. Det skal bemærkes at jo tyndere det resterende tandlag er jo mere intensivt vil den indlagte farvegengivelsen blive.*



Der slibes tilstrækkeligt materiale af protesetanden med afrundede kanter for at skabe en glidende overgang mellem akryltanden og VITA VM LC materialet.

Til slibning anvendes en fin hårdmetal fræser

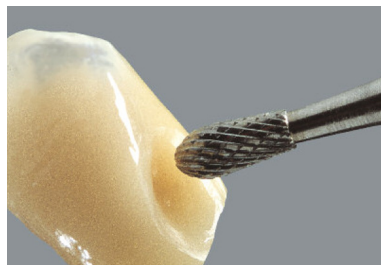

Som vist på billedet kan tanden f. eks. reduceres i det cervikale område uden at ændre på tandens form.



Den slebne overflade rengøres meget omhyggeligt og fugtes med VITA VM LC MODELLERINGSVÆSKE, best. nr. VA7698



Afhængig af hvilken individualisering man ønsker at opnå indlægges den passende farve: der er 10 forskellige VITA VM LC PAINT farver tilrådighed.

For at fikserere materialerne skal der lyshærdes umiddelbart efter pålægning.

**OBS: VITA VM LC PAINT og WINDOW må ikke ligge i overfladen. De skal dækkes fuldstændigt med dentin eller incisalmasse. Ved pålægning skal du sikre, at der ikke indsluttes luft i materialet.**



For at opnå et optimalt resultat pålægges et tyndt lag WINDOW. Den resterende opbygning af tanden kan udføres med af EMALJE, EFFEKT EMALJE eller NEUTRAL og derefter polymerisation.

**Vær opmærksom ved polymerisation at den maksimale effekt på lyslampen bør være 470 nm.**

**Er materialet ikke polymeriseret ved tilstrækkelig kraftigt lys og tid kan der efter en periode opstå misfarvninger på overfladen af det karakteriserede område.**

**Det kan anbefales at polymerisere mellem lagene for at sikrer en god polymerisering!**



Efter den sidste polymerisation færdiggøres tanden ved pudsning og polering.



Det færdige resultat

## VITA VM LC Creative sæt



- 4 stk Paint PT1, PT5, PT15, PT17
- 1 stk Window WIN
- 2 stk Effekt Emalje, EE6, EE9
- 1 stk Neutral NT
- 1 stk Emalje ENL
- 1 stk Modelleringsvæske
- 1 stk Børsteholder
- 1 stk Børstehoveder ( 10 stk)
- 1 stk Arbejdsinstruktion

## VITA VM LC malefarve sæt



- 10 stk Paint PT1 - PT 19
- 1 stk Window WIN
- 1 stk Farveskala