

Brugsvejledning VITACOLL®



VITACOLL®

Let at anvende - sikkert resultat


Den korrekte overfladebehandling af akryltænder øger tilhæftningen til akrylmaterialet.
Derfor bør du forbehandle basisfladen af akryltænderne som beskrevet i det følgende før færdigfremstilling af protesen:



1. Fjern først alt voks og anden forurening fra tænderne.



2. Rester som fedt og isolering bør fjernes ved skoldning med kogende vand.

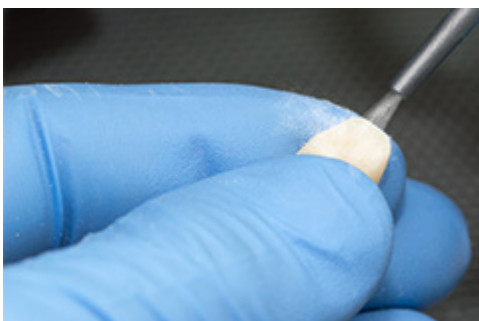

3. Basisfladen på akryltænderne gøres ru ved brug af sandblæser (kornstørrelse 110 my) med et tryk på 2-3 bar. Alternativt kan du gøre overfladen ru med en hårdmetal fræser.



4. Yderligere gøres akryltænderne ru i den cervikale del hele vejen rundt, i det område, der senere vil blive dækket af proteseakryl.



5. Tynde kanter kan meget let frakturere. Derfor bør du undgå skarpe kanter i basis området og afrunde disse med en hårdmetal fræser.



6. VITACOLL® hæftemiddel påføres med en pensel til den ru overflade på basis af protesetænderne samt på kanten rundt om tanden, der også er gjort ru.



7. Lad VITACOLL® hæftemiddel virke i 5 min. Den behandlede overflade kan kendes på sin silkematte glans. Hvis den glans mangler behandles området endnu engang med VITACOLL® hæftemiddel.

VIGTIGT:

Efter arbejdstiden, hvor VITACOLL® virker i 5 min, skal protesematerialet anvendes indenfor 10 min.

Hvis der går mere end 10 min. skal der påføres VITACOLL® igen, som beskrevet ovenfor.