

# Brugsvejledning VITA CERAMIC ETCH

Påfør VITA CERAMIC ETCH på den overflade, der skal ætzes.

Brug en engangspensel eller plastikpind.

**Lad virke i 60 sekunder.**

Fjern fuldstændig al syre fra den ætsede overflade ved hjælp af intensiv skylning med vand, damprensning eller i ultralydsapparat med destilleret vand.

Syren ikke børstes af da dette vil føre til uønsket tilsmudsning af overfladen.

Tør grundigt (f.esk. med oliefrit trykluft) inden cementering. Brug en silan bindingsformidler efter fabrikantens instruktioner.

## **VIGTIGT:**

Det keramiske arbejde bør ætzes umiddelbart inden cementering eller efter indprøvning for at undgå forurening af den ætsede overflade.

**Den ætsede overflade må ikke berøres.**

