

BETJENINGSVEJLEDNING

Wassermann Gipstrimmer HSS-AZ

med udskiftelig folieskive / punktdiamantskive

Tekniske data:

Motoreffekt HSS-AZ	700 Watt
Spænding	220 Volt /50 Hz
Omdrejningshastighed	3000 omdr/min

Ydre mål

Bredde	290 mm
Højde	310 mm
Dybde	370 mm
Bord	120 mm fremspringende
Vægt	16 kg

Indhold ved levering:

- Maskine med magnetventil og folieskive
- Skrå understøttelsesplade
- 1 til - og afløbsslange

Ekstra udstyr:

- Reservefolieskive
- Dia-Quick diamantskive
- Vægophæng
- Aftrækker
- Vanduopløseligt fedt

Installation:

Idet maskinen kun må benyttes med vand, anbefales det at installere maskinen nær en vandhane. Optimale installationsbetingelser opnår man, ved enten at placere maskinen direkte ved siden af en håndvask eller på et vægophæng over håndvasken.

Til montering af skyllevandstilslutningen anvendes en trykslange med indlagt dæklærred på ½ tomme eller 13 mm i diameter. Til vandafløbet benyttes en plastikslange på 1 tomme eller 25 mm i diameter.

Vigtigt! Slangen til vandafløbet må under ingen omstændigheder ligge således at vandafgangen forhindres og der derved opstår vandindtrængning i maskinen. Derfor skal man altid sørge for, at slangen ligger i et ensartet fald i en jævn bue (uden knæk).

Meget vigtigt! Slangen skal ligge over vandspejlet på en gipsudskiller. Slangen må ikke ligge under vand. Spændebåndet spændes omhyggeligt fast om slangen.

Vandtilførselsregulering:

Vandtilførselen reguleres ved vandhanen. Vandmængden er tilstrækkelig når slibesliven ved beslibningen nærmer sig en sort farve. Naturligvis, er det kun fuldstændig afbundne gipsmodeller, der må bearbejdes, idet blød gips virker tilstoppende, ikke mindst i afløbsrørene, men også skiven tilstopper og mister slibeefvenen. Slibningen må ske under lettere tryk og små frem og tilbage bevægelser af modellen.

Eftersyn:

Intet udover den normale pleje. Ved åbning af slibeskivekammeret kan kabinetunderstøttelsesfladerne i givet fald renses og påsmøres vandfast fedt, som derved virker tættende.

Af sikkerhedsmæssige grunde bør man regelmæssigt efterprøve spændebåndets fasthed på tilførselsslanger.

Driftsforstyrrelser:

F.eks. Vandindtrængning

1. Kontroller den regulerede vandmængde
2. Kontroller vandafløbet.
 - 2.1 Slangetværsnittet "1"?
 - 2.2 Folder slangen sig sammen?
 - 2.3 Ligger slangen ovenpå bassinet eller ligger den under vandoverfladen?
 - 2.4 Er der fald på slangen, 1 cm pr meter?
 - 2.5 Er buen for snæver?

Folieskiven:

Ved slitage er det muligt at vende folieskiven og derved benytte den modstående side. Herefter forøges levetiden betydeligt.

Henvisning:

Ved indsættelse af uoriginale reservedele garanterer producenten ikke for driften. Ved reparationer må der kun benyttes originale reservedele.