

BETJENINGSMANUAL

**SILFRADENT EV 5
DAMPRENSER**



Sikkerhedsadvarsel

Advarsel!!!!

For at undgå risikoen for elektrisk stød må dette udstyr kun tilsluttes en stikkontakt med jord.

Ved rengøring eller desinficering skal man være opmærksom på, at der ikke kommer væske ind i enheden.

Brug aldrig opløsningsmidler eller brændbare materialer i nærheden af dette eller andet elektrisk udstyr.

Træk eller håndter aldrig netledningen med våde hænder (risiko for elektrisk stød).

Kontroller altid, at netledningen ikke er beskadiget.

Udfør aldrig vedligeholdelse eller rengøring uden at fjerne netledningen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Spænding: 220 V/50Hz

Forbrug: 1700 W

Indhold: 3,0 L

Højde: 320 mm

Bredde: 365 mm

Dybde: 235 mm

Målene er inklusiv håndtag

Tryk Max: 5,0 bar

Brug af damprenseren

- Fyld kedlen som angivet ovenfor,
- Sæt netledningen i en stikkontakt med jord
- Tænd for kontakten bag maskinen
- Tænd for "POWER"-kontakten på frontpanelet
- Vent på, at trykket når driftsværdien:
 - o "Heat"-lyset skifter fra rødt til grønt,
 - o trykmålerens viser er inden for det blå zone;
 nu kan du bruge damp ved at trykke på knappen på pistolen.

Ved at dreje knappen bag grebets dyse er det muligt at justere dampstrømmen.

Når kedlen er tom, vent til trykket er nul og fyld den som vist ovenfor.



Installation

Sørg for, at der ikke er genstande (kabler, rør, platforme osv.) nær apparatets støttepunkt, som kan forstyrre dets stabilitet.

Sørg for, at stikkontakten er let tilgængelig og at den er forbundet med jord.

Fyld genopfyldningsflasken med vand.

Fjern det sorte skruelåg på toppen af EV 5.

Sæt spidsen af refillflasken ind i indsugningsrøret. Fyld kedlen med vand.

Fastgør skruelåget igen.

Ved den første påfyldning, med kedlen tom, omkring to medfølgende flasker vand kommer ind i kedlen (ca. 3 liter).

Kedlen fyldes så med ca. 2,5 liter vand, da det automatiske niveau vil signalere manglen af vand.

Brug altid kun demineraliseret eller destilleret vand.

Advarsel!

Når du skal fylde kedlen:

- Sluk for den blå kontakt på panelet
- **Vent altid på, at trykindikatoren på manometeret når nul (drejet mod uret)**
- Løsn forsigtigt kedeldækslet, og vær opmærksom på resterne af varm damp
- Vent, indtil trykket er helt nul (hvis man løsner hættten, kan det frigive noget damp)
- Skru hættten af
- Fyld kedlen med ca. halvanden flaske vand (ca. 2,5 liter), under alle omstændigheder begrænser påfyldningsniveauet sig selv, du må ikke tvinge flasken, da det ville føre til overfyldning.


Advarsel!

Forsøg aldrig at løsne kedeldækslet med udstyret tændt og/eller under tryk

LED driftsbeskrivelse

Varmestyring:

- den er grøn, når trykket er nået
 - den er rød, når den bliver varm
 - Den går ud, når niveauet griber ind
- Led-kedel (under) kontrol niveau:
- Grøn, når kedlen indeholder vand (niveausonde dækket)
 - Rød i ca. 1 minut, når vandet falder under niveausonde

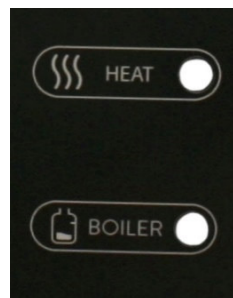

Begge LED'er blinker rødt, efter at det minut, hvor niveausonden er afdækket, er gået, og summeren lyder med mellemrum.

Begge LED'er lyser konstant rødt, og summeren lyder med mellemrum, når den termiske sikring udløses. I dette tilfælde skal maskinen sendes til reparation.