

Arbejdsvejledning til VITA VIONIC BOND



Tjek tændernes pasform for
approksimale interferenser.



Bland VITA VIONIC BOND I og II
med hinanden.



Bland de to komponenter i 30 sekun-
der for at forhindre luftbobler.



Påfør bonding på de basale over-
flader på tænderne.



Fugt caviteterne rigeligt med
bondingmateriale



Placer tandtænderne i caviteterne.



Fastgør protesetænderne med et let
tryk.



De bondede protestænder er klar til
hærdning af VITA VIONIC BOND.

1. Før BONDING placeres alle tænder i caviteterne på den fræsedede eller printede protesebasis een ad gangen, så eventuelle approksimale interferenser kan identificeres og elimineres.
2. Tænderne skal kunne placeres i caviteterne uden nogen spænding og uden mærkbar rotation.
3. En portion VITA VIONIC BOND er nok til en hel protese (en over- og en underkæbeprotese / til 28 tænder).
4. Bland de to komponenter ved hjælp af applikatoren i 30 sekunder for at forhindre luftbobler.
5. Derefter påføres og behandles limen hurtigt ved stuetemperatur (>20°C). Hærdning begynder efter 10 minutter. Klæbemiddel med lav viskositet kan fordampe, hvis det håndteres for længe. For at sikre, at den klæbende overflade er helt fugtet, anbefales brug af rigeligt bondingmateriale.
6. For at skabe en sikker binding skal tandprotesen hvile i mindst 30 minutter uden belastning, efter at tænderne er blevet indsat.
Efter 20 minutter i vandbadet i en trykbeholder (55 C, 2 bar), er hærdningen færdig. Alternativt kan hærdning opnås ved at opbevare protesen i 12 timer ved stuetemperatur uden nogen belastning.
Eventuelt overskud kan fjernes ved sandblæsning med perlablast (1 – 2 bar) efter hærdning af tænderne.